

NOWOŚĆ



FagronLab™

Butelka jałowa 5ml z zakraplaczem
zachowującym jałowość Iridya™

www.fagronlab.pl

 **Fagron**
lab

NOWOŚĆ na rynku!

Iridya™ to przełomowy wielodawkowy zakraplacz do oczu przeznaczony do precyzyjnego i wygodnego dawkowania preparatów niezawierających konserwantów.

Wydłużona końcówka, wyjątkowa ergonomia i technologia NO-JET™ zastosowane w Iridya™ zapewniają łatwe, precyzyjne i przyjazne pacjentowi zakraplanie.

- ✓ **WYDŁUŻONA KOŃCÓWKA**
- ✓ **NISKA SIŁA ŚCISKANIA**
- ✓ **KONTROLA ZAKRAPLANIA**
- ✓ **BEZPIECZEŃSTWO MIKROBIOLOGICZNE**
- ✓ **ZGODNOŚĆ Z NORMAMI GMP I WYTTCZYNYMI FDA**



Wydłużona końcówka zakraplacza
umożliwia precyzyjne i wygodne zakraplanie

Ergonomiczna, szczelna zatyczka

Pierścień gwarancyjny

Technologia NO-JET
zakraplanie „bez strumienia”, kropla po kropli

Elastyczna, sprężysta butelka

Odpowiednio miękka,
przyjazna w użyciu również przez seniorów


NAZWA PRODUKTU	OPAKOWANIE	EAN	BLOZ
FagronLab™ Butelka jałowa 5ml z zakraplaczem zachowującym jałowość Iridya™	1	5904405337950	9113147

Wysoka ochrona


mikrobiologiczna

- ✓ Butelka zachowująca **jałowość do 6 miesięcy** po otwarciu*.
- ✓ Dzięki zastosowaniu **innowacyjnego systemu filtrów** butelka chroni przed skażeniem mikrobiologicznym zapewniając jałowość na dłużej.
- ✓ **Zaawansowany system kontroli przepływu** w zakraplaczu Iridya™ sprawia, że butelka może być stosowana nawet przy preparatach o zwiększonej lepkości.

ŚCISKANIE (przepływ płynu)

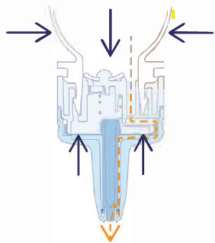


WENTYLACJA (przepływ powietrza)

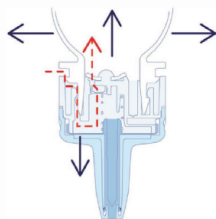

*w oparciu o badania mikrobiologiczne z wykorzystaniem Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, przeprowadzone przez: Gesellschaft für Produktionshygiene und Sterilitätssicherung mbH, Talbotstraße 21, 52068 Aachen, Germany
 1. Examination of the microbial barrier properties by challenge test (immersion procedure), reflecting worst case of application. Tip Seal Challenge Test 01 (bottle content), Long-term examination.
 2. Examination of the microbial barrier properties by challenge test (immersion procedure), reflecting worst case of application. Tip Seal Challenge Test 01 (bottle content), Short-term examination.
 3. Examination of the microbial barrier properties by challenge test (immersion procedure), reflecting worst case of application. Tip Contamination Challenge Test 01 (drop), Short-term examination.

Iridya™ wymaga o 25% mniejszej siły ściskania w porównaniu z konkurencją

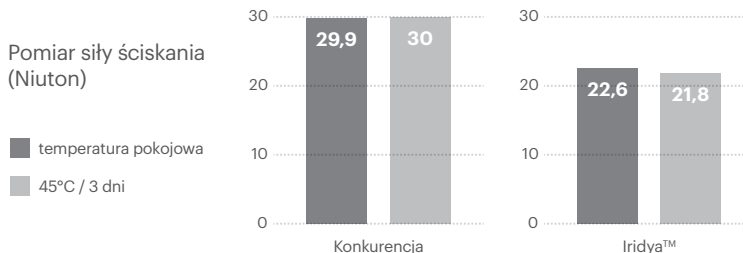

Badana formuła: 0,1% kwas hialuronowy / przeznaczony do formulacji o lepkości pomiędzy 0,003 - 0,2 Pa*s

Iridya™ pozytywnie oceniona w badaniach konsumenckich w Europie i Stanach Zjednoczonych

	Iridya™	Konkurencja #1	Konkurencja #2
APLIKACJA DAWKI			
Ogólna kontrola i łatwość	Green	Yellow	Red
Kontrola jednej kropli	Green	Yellow	Red
Kropla rezydualna (resztkowa)	Yellow	Yellow	Yellow
Precyzja	Green	Yellow	Red
Wycucie siły zakraplania	Green	Yellow	Red
Brak strumienia	Green	Red	Red
Efekt wgniecenia butelki	Green	Red	Red
ERGONOMIA			
Ogólne wrażenie - ergonomia	Green	Yellow	Red
Ogólne zaznajomienie się z produktem	Green	Yellow	Yellow
ZABEZPIECZENIE			
Pierścień gwarancyjny	Green	Green	Green



FagronLab™ zaciskarka ZR1 do butelek z zakraplaczem zachowującym jałowość

Zaciskarka ZR1 służy do zamykania butelek FagronLab™ z zakraplaczem zachowującym jałowość.

Umożliwia trwałe zamknięcie butelki poprzez docisk zakraplacza z zatyczką z pierścieniem gwarancyjnym do kołnierza butelki. Prawidłowo zamknięta butelka to gwarancja zachowania jałowości wykonanych kropli w trakcie ich stosowania przez pacjenta.

NAZWA PRODUKTU	OPAKOWANIE	EAN
FagronLab™ Zaciskarka ZR1 do butelek z zakraplaczem zachowującym jałowość	1	5904405337882

Razem
tworzymy przyszłość
spersonalizowanej medycyny.



Fagron sp. z o.o.
Oddział sprzedażowy
ul. Komandosów 1/1
32-085 Modlniczka
NIP: 679-002-64-73

bok@fagron.pl
fagronlab@fagron.pl
Sprzedaż + 48 12 3343 500

www.fagron.pl
www.fagronlab.pl



Fagron
lab